


PANEL RESPIRATORIO (20 AGENTES) EN HISOPADO NASO-FARÍNGEO

Para poder realizar esta prueba se debe solicitar al LAC el kit de toma para Panel de virus respiratorios (Medio de transporte UTM + hisopo fino adaptado a la toma nasofaríngea).

INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA TOMA

- 1- Solicitar al paciente se suene la nariz, previo a la toma.
- 2- Introducir el hisopo en la nasofaringe y girarlo durante unos 15 segundos (Hay que desprender el máximo posible de células epiteliales). La maniobra es desagradable para el paciente.

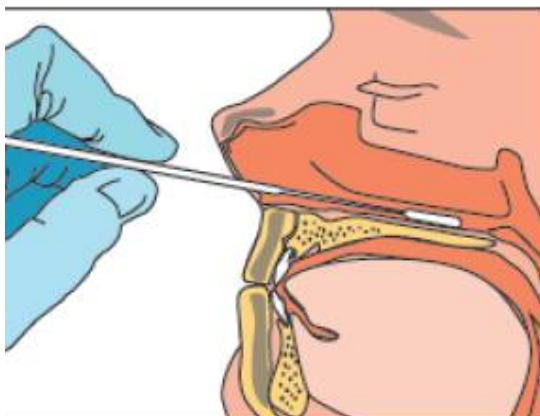

- 1- Abrir el tubo con medio de transporte UTM (caldo color naranja).
- 2- Introducir el hisopo en el tubo y romper el hisopo para que cierre el tubo.
- 3- Cerrar el tubo con su tapa de rosca.
- 4- Identificar el tubo de transporte UTM.
- 5- Enviar al Laboratorio la muestra a la brevedad.